



Covid-19 Antigen Schnelltest

Ergebnis schon nach 15 Minuten

Corona Antigen Schnelltest zum Nachweis von Viren in nasalen Abstrichproben. Für die Analyse genügt ein einfacher Abstrich aus dem vorderen Nasenbereich. Keine unangenehme Probenentnahme aus dem Rachenraum erforderlich. Das Ergebnis kann bereits nach 15 Minuten abgelesen werden.

Schnell, einfach und mit einer sehr hohen Genauigkeit.

Die Vorteile des Corona Schnelltest:

- Nachweis von SARS-CoV-2 in nasalen Proben
- kein Rachenabstrich erforderlich
- 99,22% Spezifität, 98,13% Sensitivität
- sehr schnelle Ergebnisse bereits ab 15 Minuten
- Leistungsfähigkeit bewiesen durch eine unabhängige, klinische Studie
- alle Instrumente im Kit enthalten
- Kosteneffektive Lösung für Tests im großen Maßstab
- einfache Lagerung und lange Haltbarkeit von 24 Monaten

Eine Packung Covid-19 Antigen Test enthält:

- 20 Testkassetten
- 20 Pufferflaschen
- 20 Absaugröhrchen mit Kappe
- 1 Teströhrchenhalter
- 1 Gebrauchsanleitung



Kurzanleitung:

1. Entnehmen Sie eine Probe aus dem vorderen Nasenbereich.
2. Geben Sie das Probenstäbchen in das Teströhrchen mit der Flüssigkeit und bewegen es ein paar mal hin und her.
3. Verschließen Sie das Teströhrchen mit der Kappe und schütteln es.
4. Geben Sie ein paar Tropfen der Testflüssigkeit auf die Testkassette.
5. Nach ca. 15 Minuten ist das Ergebnis auf der Testkassette ablesbar.

Nukleokapsid-Antigen in nasalen (NS) Abstrichproben direkt von Personen, welche die klinischen und / oder epidemiologischen COVID-19 Kriterien erfüllen. Das JOYSBIO COVID-19 Antigen-Schnelltestkit ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt und soll als Hilfsmittel bei der Diagnose einer SARS-CoV-2-Infektion verwendet werden. Das Produkt kann in jeder Labor- und Nicht-Laborumgebung verwendet werden, welche die in der Gebrauchsanweisung und den örtlichen Vorschriften genannten Anforderungen erfüllt.

